

Deze bijlage betreft de neuscanules uit de ProSoft Hi-VNI-serie en dient als aanvulling op de bijlagen van de gebruiksaanwijzingen van de Precision Flow Hi-VNI, de Precision Flow Plus, de Precision Flow Classic en de Precision Flow Heliox.

ProSoft-canules

Maat	Onderdeelnr.	Max. flow	Flowsnelheden in bedrijf
Lange volwassene	ProSoft-XL	40	5-40 l/min (Cassette met een hoge flow)
Volwassene	ProSoft-ADULT	40	
Kind/kleine volwassene	ProSoft-PED-AS	40	
Klein kind	ProSoft-PED-S	20	1-20 l/min (Cassette met een hoge flow van 5-20 l/min; cassette met een lage flow van 1-8 l/min)
Baby 3-12 maanden	ProSoft-INT-INF	8	1-8 l/min (cassette met een lage flow)
Baby	ProSoft-INF	8	
Een te vroeg geboren baby	ProSoft- PRE	8	
Een pasgeboren baby	ProSoft-NEO	8	

ProSoft Hi-VNI-neuscanules zijn bedoeld voor gebruik door één patiënt en moeten na dertig dagen worden vervangen. De disposable patiëntcircuits, die de dampoverdrachtscassette, het disposable watertraject en de afgifteslang omvatten, zijn bedoeld voor gebruik door één persoon en moeten na dertig dagen gebruik door een enkele patiënt, worden vervangen.

Raadpleeg het gedeelte 'Op patiënt aansluiten' van de desbetreffende Precision Flow-handleiding voor de volledige lijst van beschikbare canules evenals informatie over de selectie, de toepassing en het gebruik van de canules.