


Adapter do aerozolu - instrukcja

Przeznaczenie:

Adapter Vapotherm do aerozolu służy do podłączania nebulizatorów Aerogen® Aeroneb do systemu Technologii Vapotherm HVNI.

Instrukcja użycia:

Umieścić adapter do aerozolu w linii pomiędzy przewodem doprowadzającym pacjenta a kaniulą nosową lub adapterem maski tracheotomijnej Vapotherm TA-22. W celu zapewnienia pacjentowi większego komfortu rozważyć chwilowe przerwanie terapii HVNI podczas umieszczania adaptera w obwodzie, a następnie, przed rozpoczęciem terapii aerozolowej, szybkie zwiększenie przepływu do żądanej wartości.

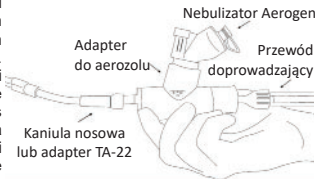

Odłączyć interfejs pacjenta od przewodu doprowadzającego. Delikatnie podłączyć adapter do przewodu doprowadzającego, aby ułatwić jego usunięcie w nieskomplikowany sposób. Następnie podłączyć interfejs pacjenta do adaptera. Po zainstalowaniu adaptera rozpocząć terapię aerozolową. Istotne jest, aby podczas podawania leku utrzymywać adapter i nebulizator odpowiednio ustawione w pionie i poziomie.

OSTRZEŻENIA:

- Pomiędzy terapiami aerozolowymi adapter należy odłączyć, ponieważ w przypadku pozostawienia go w obwodzie przez dłuższy czas nastąpi gromadzenie się kondensatu.
- W przypadku używania adaptera do ciągłej terapii aerozolowej kondensat należy odprowadzać co 30 do 60 minut lub częściej, w zależności od szybkości jego gromadzenia się. Wymagany okres jest funkcją przepływu gazu i ilości podawania leku.
- Niższe wartości przepływu i większe ilości podawanego leku wymagają częstszego odprowadzania kondensatu.
- Nieodprowadzanie kondensatu może spowodować jego podanie pacjentowi.

Instrukcje dotyczące nebulizacji aerozolu podano w Instrukcji użytkowania nebulizatorów Aerogen PRO lub SOLO. Zasady dotyczące obsługi urządzenia Precision Flow® podano w Instrukcji użytkowania urządzenia Precision Flow.



REF AAA-1

Aerosol Adapter

For use with Precision Flow®

QTY 10



Manufactured for:
Vapotherm, Inc.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833 USA
603-658-0011
May Be Patented:
www.vapotherm.com/patents



RMS-UK, Ltd.
28 Trinity Road
Nailsea,
North Somerset
BS48 4NU
United Kingdom

