



# VAPOTHERM®

## Aerosólový adaptér – Pokyny


### Zamýšľané použitie:

Aerosólový adaptér VapoTherm je určený na uľahčenie spojenia medzi systémom terapie VapoTherm HVNI a nebulizátormi Aerogen® Aeroneb.

### Pokyny na použitie:

Aerosólový adaptér umiestnite medzi prívodnú trubicu pacienta a nosovú kanylu alebo maskový tracheostomický adaptér VapoTherm TA-22. Aby sa pri umiestnení adaptéra do okruhu zvýšilo pohodlie pacienta, zvážte krátkodobé prerušenie terapie HVNI, potom rýchlo zvyšujte prietok na požadovanú hladinu pred spustením liečby aerosólom.

Odpojte rozhranie pacienta od prívodnej trubice. Opatrne pripojte adaptér k prívodnej trubici, aby ste zjednodušili ľahké odpojenie. Potom znova pripojte rozhranie pacienta k adaptéru. Po nasadení adaptéra na miesto začnite s liečbou aerosólom. V priebehu celého podávania lieku je dôležité udržať správnu polohu (kolmo a vodorovne) adaptéra a jednotky nebulizátora.

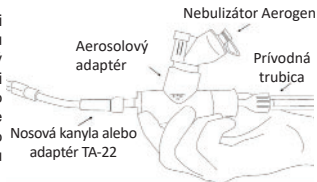

### VAROVANIA:

- Adaptér sa musí odstrániť medzi jednotlivými liečbami aerosólom, pretože ak zostane v okruhu dlhší čas, bude sa v ňom akumulovať kondenzát.
- Ak sa pomôcka využíva na kontinuálnu liečbu aerosólom, musí sa kondenzát vyprázdňovať v intervale 30 až 60 minút, ak nie častejšie v závislosti od rýchlosti akumulácie. Požadovaný interval je funkciou prietoku plynu a rýchlosti dávkovania liečiva.
- Nižšie prietoky a vyššie rýchlosti dávkovania liečiva si vyžadujú častejšie vyprázdňovanie kondenzátu.
- Ak sa kondenzát nevyprázdni, môže to viesť k dodaniu kondenzátu pacientovi.

Pokyny na aerosolovú nebulizáciu si prečítajte v Návode na použitie k pomôckam Aerogen PRO alebo SOLO. Pokyny na obsluhu pomôcky Precision Flow si prečítajte v návode na použitie k Precision Flow®.



**REF** AAA-1

## **Aerosol Adapter**

For use with Precision Flow®

**QTY** 10



Manufactured for:  
Vapotherm, Inc.  
100 Domain Drive  
Exeter, NH 03833 USA  
603-658-0011  
May Be Patented:  
[www.vapotherm.com/patents](http://www.vapotherm.com/patents)



RMS-UK, Ltd.  
28 Trinity Road  
Nailsea,  
North Somerset  
BS48 4NU  
United Kingdom

