

Este apéndice presenta la serie de cánulas nasales ProSoft Hi-VNI y está destinado a los apéndices de los manuales de instrucciones de uso de Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic y Precision Flow Heliox.

Cánulas ProSoft

Tamaño	Ref.	Flujo máx.	Caudales operativos
Adultos larga	ProSoft-XL	40	5-40 L/min (cartucho de alto flujo)
Adultos	ProSoft-ADULT	40	
Pediátrica/Adultos pequeña	ProSoft-PED-AS	40	
Pediátrica pequeña	ProSoft-PED-S	20	1-20 L/min (cartucho de alto flujo 5-20 L/min; cartucho de bajo flujo 1-8 L/min)
Lactantes intermedia	ProSoft-INT-INF	8	1-8 L/min (cartucho de bajo flujo)
Lactantes	ProSoft-INF	8	
Prematuros	ProSoft- PRE	8	
Neonatos	ProSoft-NEO	8	

Las cánulas nasales ProSoft Hi-VNI están etiquetadas para uso en un solo paciente y se deben reemplazar después de 30 días. Los circuitos de paciente desechables, que incluyen el cartucho de transferencia de vapor, el conducto de agua desechable y el tubo de suministro, están etiquetados para uso en un solo paciente y se deben reemplazar después de 30 días de uso en un solo paciente.

Para obtener la lista completa de cánulas disponibles e información sobre la selección, aplicación y uso, consulte el apartado "Conexión del paciente" del manual de Precision Flow correspondiente.