

Detta tillägg introducerar ProSoft Hi-VNI-serien av näskanyler och är avsett för bilagorna till bruksanvisningarna för Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic och Precision Flow Heliox.

#### ProSoft kanyler

Storlek	Artikelnr.	Max flöde	Flödeshastigheter för drift
Vuxen lång	ProSoft-XL	40	5-40 l/min (Högflödeskammare)
Vuxen	ProSoft-ADULT	40	
Barn/Vuxen liten	ProSoft-PED-AS	40	
Barn liten	ProSoft-PED-S	20	1-20 l/min (Högflödeskammare 5-20 l/min; Lågflödeskammare 1-8 l/min)
Spädbarn mellanstor	ProSoft-INT-INF	8	1-8 l/min (Lågflödeskammare)
Spädbarn	ProSoft-INF	8	
Prematur	ProSoft- PRE	8	
Neonatal	ProSoft-NEO	8	

ProSoft Hi-VNI näskanyler är märkta för användning av endast en patient och måste bytas ut efter 30 dagar. Patientkretsar för engångsbruk, som inkluderar befuktningsskammaren, vattensystemet för engångsbruk och patientslangen, är märkta för användning av endast en patient och måste bytas ut efter 30 dagars användning av en patient.

För den fullständiga listan över tillgängliga kanyler och information om val, applikation och användning, se avsnittet "Anslutning till patienten" i relevant bruksanvisning för Precision Flow.