



VAPOTHERM®


Aerosol Adaptörü - Talimat

Kullanım Amacı:

Vapotherm Aerosol Adaptörünün Vapotherm HVNI Teknolojisi ile Aerogen® Aeroneb nebülizatörleri arasındaki bağlantıyı kolaylaştırması amaçlanmıştır.

Kullanma Talimatı:

Aerosol Adaptörünü hasta iletme tüpü ile nazal kanül veya Vapotherm TA-22 Trakeostomi Maskesi Adaptörü arasına yerleştirin. Hasta konforunu artırmak açısından adaptörü devreye yerleştirirken HVNI Tedavisini bir süre duraklatıp aerosol tedavisini başlatmadan önce akışı istenen seviyeye hızla yükseltmeyi düşünün.

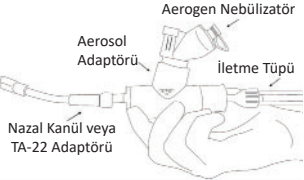

Hasta arayüzünü iletme tüpünden ayırın. Çıkarmayı kolaylaştırmak açısından adaptörü iletme tüpüne yavaşça takın. Sonra hasta arayüzünü adaptöre tekrar bağlayın. Adaptör yerleştikten sonra aerosol tedavisini başlatın. İlaç uygulama sürecinde adaptör ve nebülizatör ünitesinin uygun şekilde dik ve yatay seviyedeki yönünü korumak önemlidir.

UYARILAR:

- Adaptör, aerosol tedavileri arasında çıkarılmalıdır çünkü devrede uzun süre bırakılırsa kondensat birikecektir.
- Devamlı aerosol tedavileri için kullanıldığında birikme hızına bağlı olarak kondensat en geç 30 - 60 dakika aralıklarla boşaltılmalıdır. Gereken aralık, gaz akışı ve ilaç iletimi hızlarına bağlıdır.
- Düşük akışlar ve daha yüksek ilaç iletimi hızları kondensatın daha sık boşaltılmasını gerektirir.
- Kondensatın boşaltılmaması hastaya kondensat iletilmesiyle sonuçlanabilir.

Aerosol nebülizasyonu talimatı için Aerogen PRO veya SOLO Kullanma Talimatına bakın. Precision Flow® çalıştırma bilgisi için Precision Flow Kullanma Talimatına bakın.



REF AAA-1

Aerosol Adapter

For use with Precision Flow[®]

QTY 10



Manufactured for:
Vapotherm, Inc.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833 USA
603-658-0011
May Be Patented:
www.vapotherm.com/patents



RMS-UK, Ltd.
28 Trinity Road
Nailsea,
North Somerset
BS48 4NU
United Kingdom

