


Aerosol-Adapter – Anweisungen

Verwendungszweck:

Der Vapotherm Aerosol-Adapter ist für die einfache Verbindung zwischen der Vapotherm Hi-VNI-Technologie und den Aerogen® Aeroneb-Verneblern vorgesehen.

Gebrauchsanweisung:

Den Aerosol-Adapter zwischen dem Patienten-Verabreichungsschlauch und der Nasenbrille oder dem Vapotherm TA-22 Tracheotomiemasken-Adapter ausrichten und platzieren. Für verbesserten Patientenkomfort sollte die Hi-VNI-Therapie beim Anschließen des Adapters an den Patientenkreis kurz unterbrochen und dann der Durchfluss schnell auf die gewünschte Rate erhöht werden, bevor mit der Aerosoltherapie begonnen wird.

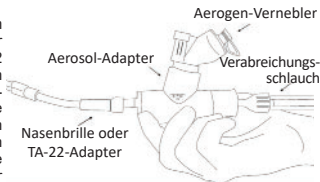

Die Patientenschnittstelle vom Verabreichungsschlauch trennen. Den Adapter vorsichtig am Verabreichungsschlauch anschließen, um später ein einfaches Entfernen zu ermöglichen. Anschließend die Patientenschnittstelle wieder am Adapter anschließen. Wenn der Adapter richtig angeschlossen ist, kann mit der Aerosoltherapie begonnen werden. Es ist wichtig, den Adapter und den Vernebler während der Medikamentenverabreichung immer aufrecht und horizontal auszurichten.

WARNHINWEISE:

- Der Adapter muss zwischen den Aerosoltherapien aus dem Patientenkreis entfernt werden. Wenn der Adapter für längere Zeit im Patientenkreis verbleibt, sammelt sich Kondensat an.
- Wenn der Adapter für eine kontinuierliche Aerosolbehandlung verwendet wird, muss das Kondensat in Abständen von 30 bis 60 Minuten oder bei schnellerer Ansammlung auch häufiger entleert werden. Die Entleerungsintervalle hängen direkt von der Geschwindigkeit des Gasflusses und der Arzneimittelverabreichung ab.
- Bei niedrigeren Durchflussraten und schnellerer Arzneimittelverabreichung muss das Kondensat häufiger abgelassen werden.
- Wenn das Kondensat nicht abgelassen wird, besteht die Gefahr, dass dieses in den Patienten gelangt.

Die Anweisungen für die Vernebelung von Aerosolen sind der Gebrauchsanweisung für die Aerogen PRO- oder SOLO-Vernebler zu entnehmen. Die Verwendung des Precision Flow-Geräts ist in der Gebrauchsanweisung für das Precision Flow® beschrieben.



REF AAA-1

Aerosol Adapter

For use with Precision Flow[®]

QTY 10



Manufactured for:
Vapotherm, Inc.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833 USA
603-658-0011
May Be Patented:
www.vapotherm.com/patents

EC **REP**

RMS-UK, Ltd.
28 Trinity Road
Nailsea,
North Somerset
BS48 4NU
United Kingdom

