


# Aerosoladapter - Instructies

## Beoogd gebruik:

De Vapotherm aerosoladapter is bedoeld om de aansluiting mogelijk te maken tussen de Vapotherm HVNI-technologie en de Aerogen® Aeroneb vernevelaars.

## Gebruiksaanwijzing:

Plaats de aerosoladapter in de lijn tussen de patiëntafgifteslang en de neuscanule of de Vapotherm TA-22 tracheamaskeradapter. Overweeg voor verbeterd comfort van de patiënt een kortstondige pauze van de HVNI-therapie wanneer de adapter in het circuit wordt geplaatst en verhoog daarna snel de flow naar het gewenste niveau alvorens de aerosolbehandeling te starten.

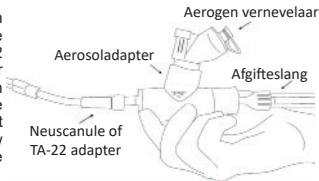

Koppel de patiënteninterface los van de afgifteslang. Sluit de adapter lichtjes aan op de afgifteslang om verwijdering te vergemakkelijken. Sluit daarna de patiënteninterface weer aan op de adapter. Zodra de adapter op zijn plaats zit, start u de aerosolbehandeling. Het is belangrijk dat de adapter en vernevelaarunit in de correcte rechtopstaande en horizontale richting worden gehouden tijdens het toedieningsproces van de medicatie.

## WAARSCHUWINGEN:

- De adapter moet tussen aerosolbehandelingen worden verwijderd, omdat er condensatie zal optreden als deze voor langere tijd in het circuit wordt gelaten.
- Wanneer gebruikt voor continue aerosolbehandelingen, moet het condensaat worden geledigd op tijdsintervallen van 30 tot 60 minuten of vaker, afhankelijk van de accumulatiesnelheid. Het vereiste interval is afhankelijk van de gasflow en afgiftesnelheden van de medicatie.
- Bij tragere flows en snellere afgiftesnelheden van de medicatie kan het condensaat vaker moeten worden afgevoerd.
- Wanneer het condensaat niet verwijderd wordt, kan dit tot gevolg hebben dat het condensaat bij de patiënt terechtkomt.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de Aerogen PRO of SOLO voor instructies van de aerosolverneveling. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de Precision Flow voor de werking van de Precision Flow®.



**REF** AAA-1

## **Aerosol Adapter**

For use with Precision Flow<sup>®</sup>

**QTY** 10



Manufactured for:  
Vapotherm, Inc.  
100 Domain Drive  
Exeter, NH 03833 USA  
603-658-0011  
May Be Patented:  
[www.vapotherm.com/patents](http://www.vapotherm.com/patents)

**EC** **REP**

RMS-UK, Ltd.  
28 Trinity Road  
Nailsea,  
North Somerset  
BS48 4NU  
United Kingdom

