


Aerosoladapter – instruktioner

Tiltænkt brug:

Vapotherm Aerosol Adapter er beregnet til at muliggøre forbindelse mellem Vapotherm HVNI Technology og Aerogen® Aeroneb-forstøvere.

Brugsanvisning:

Sæt aerosoladapteren ind mellem patientleveringsslangen og næsekanylen eller Vapotherm TA-22 Tracheotomy Mask Adapter. For at gøre det mere bekvemt for patienten bør det overvejes at holde en kort pause i HVNI-behandlingen, når adapteren placeres i kredsløbet, og derefter hurtigt køre op til det ønskede niveau, før aerosolbehandlingen startes.

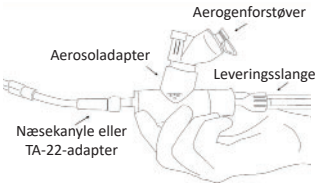

Frakobl patientforbindelsesstykket fra leveringsslangen. Sæt forsigtigt adapteren på leveringsslangen, så den er nem at fjerne. Tilslut derefter patientforbindelsesstykket til adapteren igen. Når adapteren er på plads, skal du starte aerosolbehandlingen. Det er vigtigt, at adapteren og forstøveren hele tiden er i oprejst position og ligger vandret under processen til indgivelse af medicin.

ADVARSLER:

- Adapteren skal fjernes mellem aerosolbehandlinger, da der akkumuleres kondensat, hvis den er i kredsløbet i længere tid ad gangen.
- Når den bruges til kontinuerlige aerosolbehandlinger, skal kondensatet aftømmes ved intervaller på 30 til 60 minutter, hvis ikke oftere, afhængigt af hvor meget der akkumuleres. Det krævede interval er en funktion af gasgennemstrømningen og den hastighed, medicinen leveres med.
- Lavere gennemstrømninger og højere hastigheder ved levering af medicin kræver, at kondensatet aftappes oftere.
- Hvis kondensatet ikke aftappes, kan det medføre, at kondensatet indgives i patienten.

Se i brugsanvisningen for Aerogen PRO eller SOLO vedrørende anvisninger i brug af aerosolforstøver. Se, hvordan Precision Flow® betjenes, i brugsanvisningen til Precision Flow.



REF AAA-1

Aerosol Adapter

For use with Precision Flow[®]

QTY 10



Manufactured for:
Vapotherm, Inc.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833 USA
603-658-0011
May Be Patented:
www.vapotherm.com/patents

EC **REP**

RMS-UK, Ltd.
28 Trinity Road
Nailsea,
North Somerset
BS48 4NU
United Kingdom

