

Questo addendum è stato redatto allo scopo di presentare le cannule nasali serie ProSoft Hi-VNI e deve essere utilizzato insieme alle appendici dei manuali di istruzioni per l'uso di Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic e Precision Flow Heliox

Cannule ProSoft

Dimensioni	Codice	Flusso max	Flussi di esercizio
Adulto lunga	ProSoft-XL	40	5-40 l/min (Cartuccia ad alto flusso)
Adulto	ProSoft-ADULT	40	
Pediatrica/Adulto Small	ProSoft-PED-AS	40	
Pediatrica Small	ProSoft-PED-S	20	1-20 l/min (cartuccia ad alto flusso: 5-40 l/min; cartuccia a basso flusso: 1-8 l/min)
Lattante intermedia	ProSoft-INT-INF	8	1-8 l/min (cartuccia a basso flusso)
Lattante	ProSoft-INF	8	
Prematuro	ProSoft- PRE	8	
Neonato	ProSoft-NEO	8	

Le cannule nasali ProSoft Hi-VNI sono classificate esclusivamente come dispositivi monopaziente e devono essere sostituite dopo 30 giorni. I circuiti monopaziente, che comprendono la cartuccia scambiatrice di calore, la linea monouso dell'acqua e il tubo di erogazione, sono classificati esclusivamente come dispositivi monopaziente e devono essere sostituiti ogni 30 giorni di utilizzo su un singolo paziente.

Per un elenco completo delle cannule disponibili e informazioni in merito alla selezione, all'applicazione e all'uso, consultare il paragrafo "Collegamento al paziente" del manuale del sistema Precision Flow pertinente.