

Dieser Nachtrag stellt die ProSoft Hi-VNI Nasenkanülen- Reihe vor und ist für die Anhänge der Gebrauchsanweisungen von Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic und Precision Flow Heliox bestimmt.

ProSoft Kanülen

Größe	Teilenummer	Max. Durchfluss	Mögliche Durchflussraten
Erwachsene, lange	ProSoft-XL	40	5-40 l/min High-Flow-Patrone
Erwachsene	ProSoft-ADULT	40	
Pädiatrische / für kleine Erwachsene	ProSoft-PED-AS	40	
Pädiatrisch kleine	ProSoft-PED-S	20	1-20 l/min (High-Flow-Patrone 5-20 l/min; Low-Flow-Patrone 1-8 l/min)
Größere Säuglinge	ProSoft-INT-INF	8	1-8 l/min (Low-Flow-Patrone)
Säuglinge	ProSoft-INF	8	
Frühgeborene	ProSoft- PRE	8	
Neugeborene	ProSoft-NEO	8	

ProSoft Hi-VNI Nasenkanülen sind nur zur Benutzung für einen einzigen Patienten gekennzeichnet und müssen nach 30 Tagen ersetzt werden. Die Einweg-Patientenkreissysteme, die die Dampfübertragungspatrone, den Einwegwasserpfad und den Verabreichungsschlauch beinhalten, sind nur zur Benutzung für einen einzigen Patienten gekennzeichnet und müssen nach 30 Tagen ersetzt werden.

Eine komplette Liste über die verfügbaren Kanülen, sowie Informationen zur Auswahl befinden sich im Abschnitt „Anschluss an den Patienten“ in der Gebrauchsanweisung des entsprechenden Precision Flow Gerätes.