

Dette tillæg introducerer ProSoft Hi-VNI Nasal Cannulas-serien og er beregnet til appendikserne til brugsanvisningerne til Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic og Precision Flow Heliox.

ProSoft Cannulas

Størrelse	Varenr.	Maks. flow	Intervaller for driftsflow
Voksen, lang	ProSoft-XL	40	5-40 l/min. (patron med højt flow)
Voksen	ProSoft-ADULT	40	
Pædiatrisk/voksen, lille	ProSoft-PED-AS	40	
Pædiatrisk, lille	ProSoft-PED-S	20	1-20 l/min. (patron med højt flow, 5-20 l/min.; patron med lavt flow, 1-8 l/min.)
Mellemstort spædbarn	ProSoft-INT-INF	8	1-8 l/min. (patron med lavt flow)
Spædbarn	ProSoft-INF	8	
Præmatur	ProSoft- PRE	8	
Nyfødt	ProSoft-NEO	8	

ProSoft Hi-VNI Nasal Cannulas er mærket til brug på kun en enkelt patient og skal udskiftes efter 30 dage. Patientkredsløb til engangsbrug, som indeholder fugtoverførselspatron, engangsvandforsyning og afgangsslange, er mærket til brug på kun en enkelt patient og skal udskiftes efter 30 dages brug på en enkelt patient.

Se en komplet liste over tilgængelige kanyler og oplysninger om valg, anvendelse og brug i afsnittet "Tilslutning til patient" i den relevante Precision Flow-vejledning.