

Dette tillegget introduserer ProSoft Hi-VNI-nesekanyleserien og er beregnet for vedleggene til bruksanvisningshåndbøkene for Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic og Precision Flow Heliox

ProSoft-kanyler

Størrelse	Del nr.	Maks. strømning	Driftsmessige strømningshastigheter
Voksen, lang	ProSoft-XL	40	5-40 l/min. (Høy strømningspatron)
Voksen	ProSoft-Adult	40	
Pediatrik/Voksen, liten	ProSoft-PED-AS	40	
Pediatrik, liten	ProSoft-PED-S	20	1-20 l/min. (Høy strømningspatron 5-20 l/min. Lav strømningspatron 1-8 l/min.)
Middels, spedbarn	ProSoft-INT-INF	8	1-8 l/min. (Lav strømningspatron)
Spedbarn	ProSoft-INF	8	
For tidlig født	ProSoft-PRE	8	
Nyfødt	ProSoft-NEO	8	

ProSoft Hi-VNI-nesekanyler er merket som kun til bruk for en enkel pasient og må skiftes etter 30 dager. Pasientkretser til engangsbruk som inkluderer dampoverføringspatronen, vannbanen og leveringslangen til engangsbruk, er merket som kun til bruk for en enkel pasient og må skiftes ved 30 dagers bruk på en enkel pasient.

For den fullstendige listen med tilgjengelige kanyler og informasjon om valg, påføring og bruk se avsnittet "Koble til pasienten" i den aktuelle Precision Flow-håndboken.