

Настоящото допълнение представя серията назални канюли ProSoft Hi-VNI и е предназначено за Приложенията към Ръководствата с инструкции за употреба на Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic и Precision Flow Heliox.

#### Канюли ProSoft

Размер	Част №	Макс. поток	Работни дебити
Възрастни, дълга	ProSoft-XL	40	5 – 40 l/min (касета с висок поток)
Възрастни	ProSoft-ADULT	40	
Педиатрична/възрастни, малка	ProSoft-PED-AS	40	
Педиатрична малка	ProSoft-PED-S	20	1 – 20 l/min (касета с висок поток 5 – 20 l/min; касета с нисък поток 1 – 8 l/min)
Междинна детска	ProSoft-INT-INF	8	1 – 8 l/min (касета с нисък поток)
Детска	ProSoft-INF	8	
Преждевременно родени	ProSoft- PRE	8	
Новородени	ProSoft-NEO	8	

Назалните канюли ProSoft Hi-VNI Nasal Cannulas са обозначени за използване само на един пациент и трябва да бъдат сменени след 30 дни. Пациентските контури за еднократна употреба, които включват касетата за пренос на пара, канала за вода за еднократна употреба и хранващата тръба, са обозначени за използване само на един пациент и трябва да бъдат сменени след 30 дни използване на един пациент.

За пълния списък с налични канюли и информация за избора, приложението и употребата вижте раздела „Свързване към пациент“ от съответното ръководство за Precision Flow.