

Tento dodatek představuje řadu nosních kanyl ProSoft Hi-VNI a je určen pro přílohy k Návodům k použití přístrojů Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic and Precision Flow Heliox.

Kanyly ProSoft

Velikost	Součást č.	Maximální průtok	Pracovní průtoky
Adult Long (Pro dospělé – dlouhá)	ProSoft-XL	40	5-40 l/min (kazeta s vysokým průtokem)
Dospělí	ProSoft-ADULT	40	
Pro děti/dospělé – malá	ProSoft-PED-AS	40	
Dětská malá	ProSoft-PED-S	20	1–20 l/min (kazeta s vysokým průtokem 5–20 l/min; kazeta s nízkým průtokem 1–8 l/min)
Střední, pro kojence	ProSoft-INT-INF	8	1–8 l/min (kazeta s nízkým průtokem)
Děti	ProSoft-INF	8	
Předčasně narozené děti	ProSoft- PRE	8	
Novorozenci	ProSoft-NEO	8	

Nosní kanyly ProSoft Hi-VNI jsou schváleny pouze k použití u jednoho pacienta a je nutno je po 30 dnech vyměnit. Jednorázové patientské dýchací okruhy, které obsahují parní kazetu, jednorázovou vodní cestu a aplikační hadičku, jsou schváleny k použití pouze u jednoho pacienta a je nutno je po 30 dnech použití u jednoho pacienta vyměnit.

Kompletní seznam dostupných kanyl a informace o výběru, aplikaci a použití jsou uvedeny v části „Připojení k pacientovi“ v příslušné příručce přístroje Precision Flow.