

Tento dodatok predstavuje nosnú kanylu radu ProSoft Hi-VNI a je určený ako súčasť príloh k návodom na použitie systémov Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic, and Precision Flow Heliox.

#### Kanyly ProSoft

Veľkosť	Číslo dielu	Max. prietok	Operačné prietoky
Dlhá pre dospelých	ProSoft-XL	40	5 – 40 l/min (kazeta s vysokým prietokom)
Dospelý	ProSoft-ADULT	40	
Malá pre deti/dospelých	ProSoft-PED-AS	40	
Malá pre deti	ProSoft-PED-S	20	1 – 20 l/min (vločka s vysokým prietokom 5 – 20 l/min; Kazeta s nízkym prietokom 1 – 8 l/min)
Stredná pre deti	ProSoft-INT-INF	8	1-8 L/min (kazeta s nízkym prietokom)
Pre deti	ProSoft-INF	8	
Predčasne narodené dieťa	ProSoft- PRE	8	
Novorodenec	ProSoft-NEO	8	

Nosné kanyly ProSoft Hi-VN sú označené na jednorazové použitie a musia sa po 30 dňoch vymeniť. Jednorazové patientské okruhy, ktorých súčasťou je kazeta na prenos výparov, jednorazový vodný kanál a dávkovacia trubica, sú označené ako jednorazové a musia sa vymeniť po 30 dňoch používania u jedného pacienta.

Celý zoznam dostupných kanýľ a informácie o výbere, aplikácii a použití nájdete v časti „Pripojenie k pacientovi“ príslušnej príručky systému Precision Flow.