

Niniejszy dodatek przedstawia serię kaniul donosowych ProSoft Hi-VNI i jest przeznaczony do umieszczenia w załącznikach instrukcji obsługi wyrobów Precision Flow Hi-VNI, Precision Flow Plus, Precision Flow Classic i Precision Flow Heliox.

#### Kaniule ProSoft

Rozmiar	Nr kat.	Przepływ maks.	Robocze natężenia przepływu
Dla dorosłych, długa	ProSoft-XL	40	5–40 l/min (wkład wysokoprzepływowo)
Dla dorosłych	ProSoft-ADULT	40	
Dla dzieci/dorosłych, mała	ProSoft-PED-AS	40	
Dla dzieci, mała	ProSoft-PED-S	20	1–20 l/min (wkład wysokoprzepływowo 5–20 l/min; Wkład niskoprzepływowo 1–8 l/min)
Średnia, niemowlęca	ProSoft-INT-INF	8	1–8 l/min (wkład niskoprzepływowo)
Niemowlęca	ProSoft-INF	8	
Dla wcześniaków	ProSoft- PRE	8	
Noworodkowa	ProSoft-NEO	8	

Kaniule donosowe ProSoft Hi-VNI są oznakowane jako przeznaczone do użytku wyłącznie u jednego pacjenta i należy wymienić je po upływie 30 dni. Jednorazowe obwody pacjenta, które zawierają wkład przenoszący pary, jednorazowy przewód wody i przewód podający, są oznakowane jako przeznaczone do użytku wyłącznie u jednego pacjenta i należy wymienić je po upływie 30 dni stosowania u jednego pacjenta.

Pełna lista dostępnych kaniul oraz informacje dotyczące doboru, zastosowania i użytkowania, patrz punkt „Podłączanie pacjenta” w odpowiednim podręczniku dotyczącym urządzenia Precision Flow.