


<b>Technisch bulletin</b>		
 <b>VAPOTHERM</b>	<b>TITEL: HVT 2.0-updates voor gebruiksaanwijzingen</b>	
DOC-NR.: TECH-00044_NL-BE	Revisie: A	BLADZIJDE: 1 van 2

**Distributie:** Vapotherm-website, klantenservice, technische ondersteuning en verkoopteam (wereldwijd)

**Onderwerp:** Dit bulletin dient als update van uw gebruiksaanwijzing HVT 2.0:

- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Zie de gebruiksaanwijzing waarnaar hierboven wordt verwezen voor volledige instructies en alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

**Datum:** augustus 2022

Gelieve de volgende informatie te vervangen en/of toe te voegen aan de rubrieken zoals aangegeven:

## Het HVT 2.0-apparaat de eerste keer instellen


### Stap 5: Apparaatvoorkeuren instellen

Vervang *afbeelding 7: Voorkeursinstellingen voor het apparaat* door het volgende:

<p><b>Stap 5: Apparaatvoorkeuren instellen</b></p> <p>Stel de apparaatvoorkeuren in.</p>	 <p><i>Afbeelding 7: Instellingen apparaatvoorkeuren</i></p>
--	--

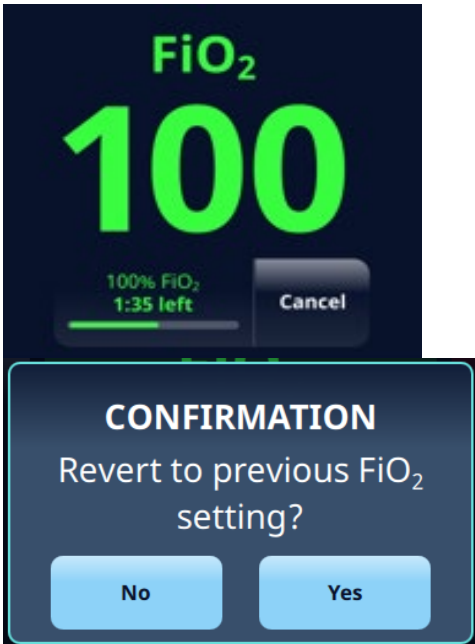
## Het type patiëntinterface selecteren

6. Laat de DPC met water vullen voordat u met de therapie begint. Het apparaat geeft aan wanneer het primen is voltooid. Het kan tot 5 minuten duren voordat de watertoevoer de DPC, met inbegrip van flexibele, stijve of halfstijve waterzakken en flessen, heeft gevuld.

<b>Technisch bulletin</b>		
 <b>VAPOTHERM</b>	<b>TITEL: HVT 2.0-updates voor gebruiksaanwijzingen</b>	
DOC-NR.: TECH-00044_NL-BE	Revisie: A	BLADZIJDE: 2 van 2

## Therapieparameters selecteren

Vervangen! Opmerking and afbeelding 31: 100% FiO<sub>2</sub>-timer wordt weergegeven met het volgende:

<p>Wanneer de knop [100% FiO<sub>2</sub>] wordt ingedrukt en bevestigd, wordt FiO<sub>2</sub> op 100% toegediend gedurende 2 minuten en wordt een timer weergegeven op het scherm.</p> <p>Wanneer de 2 minuten zijn verstreken, wordt de instelling FiO<sub>2</sub> weer op de oorspronkelijke waarde ingesteld.</p> <p><b>! OPMERKING:</b> Om de toediening van 100% FiO<sub>2</sub> te stoppen voordat de 2 minuten verstrijken en terug te keren naar de vorige FiO<sub>2</sub>-instelling, tikt u op de knop [Annuleren] en &lt;BEVESTIGEN&gt; door te tikken op [Ja]. Om door te gaan met het toedienen van 100% FiO<sub>2</sub>, tikt u op [Nee].</p>	
---	---

*Afbeelding 31: 100% FiO<sub>2</sub> timer wordt weergegeven*

## Een patiënt overbrengen

Voeg de volgende !Opmerking toe aan stap 5:

**! OPMERKING:** Wanneer het apparaat op netvoeding is aangesloten, kan het opladen van de transferbatterij vertraagd of gepauzeerd worden als het apparaat buiten het temperatuurbereik van 20 - 25 graden Celsius wordt gebruikt.

Als u vragen hebt over deze wijziging, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Vapotherm op [ts@vtherm.com](mailto:ts@vtherm.com) of met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Vapotherm.