

Unidad de traslado de Vapotherm

Tecnología Hi-VNI™ portátil con O₂

Permita a los pacientes **caminar y trasladarse** sin comprometer la asistencia respiratoria.

- Mantenga los niveles de flujo de oxígeno, temperatura y humidificación
- Transición impecable entre los tanques y el gas de pared
- Intercambio fácil y directo del circuito del paciente a una unidad fija
- Alarmas para avisar al usuario si se interrumpe la terapia



Unidad de traslado de VapoTherm

Especificaciones técnicas

La unidad de traslado de VapoTherm incluye el carrito médico Precision Flow, una fuente de alimentación portátil de grado médico, el colector de gas y el soporte para tanques tamaño "E".

Información para pedidos

Número de parte: PF-VTU-NIST (No incluye la unidad Precision Flow)

Número de parte: PF-UNIT-VTU-NIST (Incluye la unidad Precision Flow)

Rendimiento

La unidad de traslado de VapoTherm (PF-VTU-NIST) permite la administración portátil de la tecnología Hi-VNI™ dentro de un entorno hospitalario.

Suministro de gas de los tanques: el tiempo de funcionamiento portátil dependerá de las configuraciones de flujo de oxígeno y de la combinación de O₂ y aire del dispositivo Precision Flow.

Valores de ejemplo:

Flujo de oxígeno	FiO ₂	Tiempo aproximado en minutos
4	50 %	170
4	100 %	140
25	50 %	27
25	21 % o 100 %	22
40	50 %	17
40	21 % o 100 %	14

Consulte las instrucciones de uso para obtener otros valores

Vida útil de la batería: hasta 1 hora.

Tiempo de recarga: menos de 3 horas, según se muestra en la interfaz de usuario remota.



Requisitos del sistema

- Tomacorriente de pared de grado médico de 220/240 VCA (para cargar la batería)
- Tanque de oxígeno tamaño "E" regulado a 50 psi
- Regulador de tanque de oxígeno tamaño "E" (no incluido)
- Tanque de aire tamaño "E" regulado a 50 psi
- Regulador de tanque de aire tamaño "E" (no incluido)
- Precision Flow de VapoTherm

VapoTherm Inc.
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833 EE. UU.
603-658-0011
Puede estar protegido
por una o más patentes:
www.vapoTherm.com/patents

EC REP
RMS-UK, Ltd.
28 Trinity Road
Nailsea, North Somerset
BS48 4NU
Reino Unido

CE 0297